

STOPPEN Sie, falls Sie irgendeinen Widerstand spüren.
Axillär: Messzeit: 6 Minuten, Normaltemperatur: ca. 36,7°C.
 Die axilläre Messmethode liefert nicht so genaue Messwerte wie die orale und rektale Messung. Reiben Sie die Achselhöhle mit einem trockenen Tuch ab. Das Thermometer wird in der Achselhöhle platziert und der Arm dabei fest an den Oberkörper gedrückt.

Reinigungshinweise:

1. Das Thermometer besitzt eine hermetisch dichte, hygienische Glashülle und ist uneingeschränkt desinfizierbar.
2. Die Temperatur der Reinigungs- und Desinfektionslösung darf 42°C nicht übersteigen.
3. Kaltes Seifenwasser und Alkohol mit 75%-iger Konzentration können vor und nach dem Gebrauch zur Reinigung des Glaskörperthermometers verwendet werden.
4. Nach der Reinigung sollte das Thermometer in der Plastikverpackung aufbewahrt werden.
5. Sollte das Thermometer zur rektalen Messung verwendet werden, bewahren Sie es getrennt auf. Das Thermometer sollte dann nicht mehr zur oralen Messung verwendet werden.

Lagerung und Transport:

Das Thermometer sollte bei Temperaturen von 0°C bis 42°C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 80% gelagert werden und von korrosiven Gasen ferngehalten werden.

Garantie:

Auf dieses Thermometer wird bei normaler Anwendung unbegrenzte Garantie auf Funktion und Messgenauigkeit (mit Ausnahme von Bruch des Glases) seitens des Herstellers gewährt. Durch unsachgemäßen Umgang verursachte Schäden unterliegen nicht der Gewährleistung.

Eine wiederkehrende messtechnische Kontrolle ist nicht erforderlich!

SYMBOLINDEX

 CE 0123	CE Zeichen	 LOT	Chargenbezeichnung
	Hersteller	 EC REP	EU-Repräsentant
	Tag der Herstellung		Achtung

KONTAKTINFORMATION

 Jiaxing Funing Medical Instrument Co., Ltd.
 3rd Floor, Building C, Innovation town, Guigu Park, Luoxing Street, 314100 Jiahsan County,
 Zhejiang Province, P.R. China
 TEL: +86-573-84601813-805 FAX: +86-573-84601812

 EC REP

Prolinx GmbH
 Brehmstr. 56, 40239, Duesseldorf
 Tel: 0049 2131 4051968-0
 Fax: 0049 2131 4051968-9
 Contact Person: Mr. Nianzhuang Liu
 Dimdi Code: DE/0000045300
 E-mail: dusai@eulinx.eu